


摺合式床邊扶手

- 一鍵摺合，佔用空間小，適合香港普遍床款
- 可協助上落床亦可防跌，多種長度選擇適合不同須求
- 兩種高度選擇，適合不同床褥
- 兩種顏色選擇，配搭傢俱色調

* 安裝方法: 安裝於床架或側板，需要 1.5" 空間 (2" 床褥需要 2"-3" 空間)
* 特殊案例亦會添加其他配件協助安裝或固定於床板

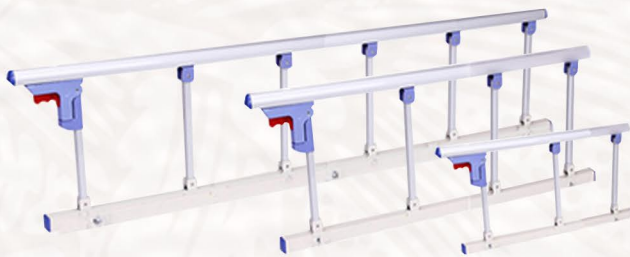

扶手使用時



扶手摺合後需要空間放下



案例相片參考

摺合式床邊扶手 (使用時)	摺合後長度和高	適合床褥
型號: XP5P(銀藍色) / XP5G(木紋色) 27"長 X 14.5"高	38.5"長 X 5.25"高	2-4 吋
型號: XP6P(銀藍色) / XP6G(木紋色) 37"長 X 14.5"高	48.5"長 X 5.25"高	2-4 吋
型號: XP7P(銀藍色) / XP7G(木紋色) 47"長 X 14.5"高	58.5"長 X 5.25"高	2-4 吋
型號: XP8P(銀藍色) / XP8G(木紋色) 57"長 X 14.5"高	68.5"長 X 5.25"高	2-4 吋
型號: HP5P(銀藍色) / HP5G(木紋色) 27"長 X 19"高	43.5"長 X 7.5"高	4.5-8 吋
型號: HP6P(銀藍色) / HP6G(木紋色) 37"長 X 19"高	53.5"長 X 7.5"高	4.5-8 吋
型號: HP7P(銀藍色) / HP7G(木紋色) 47"長 X 19"高	63.5"長 X 7.5"高	4.5-8 吋
型號: HP8P(銀藍色) / HP8G(木紋色) 57"長 X 19"高	73.5"長 X 7.5"高	4.5-8 吋

- 如鐵床板或鐵床架安裝將收取額外費用
- 市面床款眾多情況各有不同，如對安裝有疑問歡迎將床的相片發給我們提供建議:
電郵:sales@nrmedic.com Whatsapp: 69911755 (只作 Whatsapp 用途)

床邊扶手及防跌床欄



BP3888 床邊無腳扶手

- 簡易固定扶手，協助上落床
- 高度: 17"，長度: 14"
- 連 24" x 24" 木底板
- * 安裝方法: 將底板用螺絲固定於床板上
- * 除了使用較重身床褥(例如彈簧床褥)和有床褥檔板外，建議將扶手固定於床板上
- * 2"-3"床褥建議可以不使用木底板，直接固定於床板，減少厚度


BP3868 床邊無腳雙扶手

- 左右各裝一個 BP3888
- 底板可根據使用者的床板寬度而訂製，請提供準確的底板訂製尺寸



XP4P 下翻式床邊扶手

- 可協助上落床
- 可調三種長度: 26"、33.5"和 42"
- 全高: 22.5"
- 建議 7"以上床褥使用
- * 安裝方式: 用螺絲固定於床板上
- * 床板離地高度最少 18.5"，否則妨礙床欄下翻

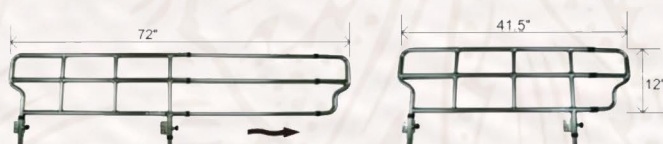

XP1P 防跌床欄

- 用於防跌，使用者不易自行拆除
- 欄高度 12"，可調較長度: 41.5-72" (六檔)
- 適合床褥 6.5"以下
- * 安裝方法: 固定於床架需要至少 3.5"



XP2P2 下翻式防跌床欄

- 用於防跌，總長: 37.5"
- * 安裝方式: 用螺絲固定於床板上，使用不同高度的配件迎合不同厚度的床褥，須注意床板離地高度，否則妨礙床欄下翻

床褥厚度	0-2"	2-4"	4"-7"	7"以上
床欄總高 (連配件)	12"	14"	16"	19"
床板須離地	16"	14"	12"	8.5"

- 防跌床欄主要用於防跌，借力上落床能力較弱。如需借力上落床請選擇床邊扶手
- 如床褥下是網底或床板下藏有收納櫃，請選擇安裝於床架的款式
- 如鐵床板或鐵床架安裝將收取額外費用
- 市面床款眾多情況各有不同，如對安裝有疑問歡迎將床的相片發給我們提供建議:
電郵: sales@nrmedic.com Whatsapp: 69911755 (只作 Whatsapp 用途)